

Variolink® II Try-In

Instructions for Use
Gebrauchsinformation
Mode d'emploi
Istruzioni d'uso
Instrucciones de uso
Instruções de Uso

Инструкция по применению

– Водорастворимая глицериновая примерочная паста

Для использования только в стоматологии!

Caution: U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist.

Сделано в Лихтенштейне
Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Шаан/Лихтенштейн

CE 0123


ivoclar
vivadent:
clinical

Variolink II Try-In [RU]

Русский

Инструкция по применению

Описание

Variolink II Try-In пасты – это водорастворимые глицериновые пасты. Они позволяют проверить цвет непрямым композитных, керамических реставраций (вкладыш inlay/onlay, коронок, безметалловых адгезивных мостовидных протезов, виниров) перед постоянной фиксацией на композитный цемент Variolink. С помощью примерочных Try-In паст подбирается идеальный цвет композитного цемента. Прозрачность и цвет этих паст соответствуют параметрам полностью заполимеризованного композитного цемента Variolink II (см. Примечание). Как и Variolink II, примерочные пасты выпускаются 6 цветов и 3 степеней вязкости:

Цвета

	Chromascope	A–D
Variolink II		
Основная паста		
bleach XL	010	–
прозрачный	T	–
белый	110	A1
опаковый белый	–	–
желтый (универсальный)	210	A3
коричневый	340	A4
Катализатор		
высокая/низкая вязкость		
прозрачный	T	–
желтый (универсальный)	210	A3
Variolink II Try-In		
bleach XL	010	–
прозрачный	T	–
белый	110	A1
опаковый белый	–	–
желтый (универсальный)	210	A3
коричневый	340	A4

Состав

Примерочные пасты состоят из глицерина, минеральных наполнителей и красителей.

Показания

Имитация цвета композитного цемента для постоянной фиксации. Проверка краевого прилегания постоянной реставрации. Защита шероховатой поверхности керамической реставрации при ее припасовке, если она протравливалась в лаборатории.

Противопоказания

Не используйте примерочные пасты при наличии у пациента аллергии к любому из компонентов материала.

Побочное действие

До настоящего времени не обнаружено.

Взаимодействие с другими материалами

Тщательно удалите примерочную пасту с реставрации перед ее постоянной фиксацией. В противном случае может быть нарушено сцепление между реставрацией и Variolink II.

Применение

Выберите примерочную пасту наиболее подходящую по цвету к реставрации. Затем нанесите небольшое количество пасты на реставрацию и аккуратно установите ее без давления. Если реставрация «не садится» с легкостью на место, проверьте проксимальные поверхности на наличие преждевременных контактов. Не прикалывайте большой усилий (риск поломки). Не проверяйте окклюзию до окончательной цементировки (риск поломки).

Внимание

Композитный цемент Variolink II обеспечивает как световое, так двойное твердение (световая и химическая полимеризация). При использовании двойного твердения имитация точного цвета может быть достигнута смешиванием Try-In пасты цвета 210/A3 (имитирует пасту-катализатор) со второй Try-In пастой (имитирует выбранный цвет основной пасты). Пасты смешиваются в равных долях.

Примерочные пасты водорастворимы. Они легко удаляются при промывании реставрации в проточной воде или в ультразвуковой ванночке. Тщательно очистите и высушите реставрацию. После этого

реставрация цементируется с помощью Variolink II (см. инструкцию по применению Variolink II).

Примечание

Цвета примерочных паст и соответствующих паст Variolink II слегка отличаются в незаполимеризованном состоянии. Цвет композитного цемента слегка меняется в течение полимеризации и сразу после нее. **Цвета примерочных Try-In паст соответствуют цветам полностью заполимеризованного композитного цемента Variolink II.**

Хранение

- Не используйте Variolink II Try-In после окончания срока годности.
- Хранить при комнатной температуре (2–28 °C/36–82 °F).
- Срок хранения: смотри дату окончания срока хранения

**Хранить в недоступном для детей месте!
Для использования только в стоматологии!**

Дата подготовки информации:
08/2003

Производитель:

Ivoclar Vivadent AG
FL-9494 Шаан/Лихтенштейн

Этот материал разработан исключительно для применения в стоматологии и должен использоваться строго в соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственности в случае использования материала не по инструкции или в непредусмотренной области применения. Потребитель несет собственную ответственность за тестирование материала на пригодность его применения для любых целей, не указанных явно в инструкции. Описания и приведенные данные не являются гарантией свойств.