

# Variolink® Veneer Try-In

## Инструкция по применению

– Водорастворимая глицериновая примерочная паста

Русский

## Инструкция по применению

### Описание

Variolink Veneer Try-In пасты – это водорастворимые глицериновые пасты. Они позволяют проверить цвет непрямых композитных и керамических реставраций (виниров, вкладок inlay/onlay) перед постоянной фиксацией на композитный цемент Variolink Veneer. С помощью примерочных Try-In паст подбирается идеальный цвет композитного цемента. Пожалуйста, имейте в виду, что прозрачность и цвет этих паст соответствует параметрам заполимеризованного (!) композитного цемента Variolink Veneer.

### Цвета

- Variolink Veneer High Value +3 (Светлый +3)
- Variolink Veneer High Value +2 (Светлый +2)
- Variolink Veneer High Value +1 (Светлый +1)
- Variolink Veneer Medium Value 0 (Среднее значение)
- Variolink Veneer Low Value -1 (Темный -1)
- Variolink Veneer Low Value -2 (Темный -2)
- Variolink Veneer Low Value -3 (Темный -3)

### Состав

Примерочные пасты Variolink Veneer состоят из глицерина, минеральных наполнителей и красителей.

### Показания

Имитация цвета композитного цемента для постоянной фиксации. Проверка краевого прилегания постоянной реставрации. Защита шероховатой поверхности керамической реставрации при ее припасовке, если она протравливалась в лаборатории.

### Противопоказания

Не используйте примерочные пасты при наличии у пациента аллергии к любому из компонентов материала.

### Побочное действие

До настоящего времени не обнаружено.

### Взаимодействие с другими материалами

Тщательно удалите примерочную пасту с реставрации перед ее постоянной фиксацией. В противном случае

CE 0123

ivoclar  
vivadent  
clinical

597304/0905WE3/H

может быть нарушено сцепление между реставрацией и Variolink Veneer.

- Хранить при комнатной температуре.
- Срок хранения: смотри дату окончания срока хранения

**Хранить в недоступном для детей месте!  
Для использования только в стоматологии!**

**Дата подготовки информации: 08/2005**

### **Применение**

Градации цветов Variolink Veneer основана на влиянии цемента на светлоту окончательной реставрации. Variolink Veneer Medium Value (MV) 0 не оказывает никакого или только незначительное влияние на светлоту реставрации, обладает самой высокой полупрозрачностью и поэтому является наиболее нейтральным по отношению к цвету. Светлые цвета High Value (HV) +1, +2, +3 делают реставрацию светлее, а темные Low Value (LV) -1, -2, -3 придают реставрации «теплый» более темный оттенок. Нанесите небольшое количество пасты Variolink Veneer Try-In выбранного цвета на реставрацию и аккуратно установите ее без давления. Если реставрация «не садится» с легкостью на место, проверьте проксимальные поверхности на наличие преждевременных контактов. Не прикладывайте большой усилий (риск поломки!). Не проверяйте окклюзию до окончательной цементировки (риск поломки!).

### **Примечание**

- Примерочные пасты – водорастворимы и легко удаляются при промывании реставрации в проточной воде или в ультразвуковой ванночке. Тщательно очистите и высушите реставрацию.
- После этого реставрация адгезивно цементируется с помощью Variolink Veneer (см. инструкцию по применению Variolink Veneer).
- Может наблюдаться трудно заметная разница в цвете между примерочной пастой и соответствующей пастой Variolink Veneer в незаполимеризованном состоянии. Цвет композитного цемента слегка меняется в течение полимеризации и сразу после нее. Цвета примерочных паст соответствуют цветам полностью заполимеризованного композитного цемента.

### **Хранение**

- Не используйте примерочные пасты после окончания срока годности.

### **Производитель:**

Ivoclar Vivadent AG  
FL-9494 Шаан/Лихтенштейн

Этот материал разработан исключительно для применения в стоматологии и должен использоваться строго в соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственности в случае использования материала не по инструкции или в непредусмотренной области применения. Потребитель несет собственную ответственность за тестирование материала на пригодность его применения для любых целей, не указанных явно в инструкции. Описания приведенные данные не являются гарантией свойств.